

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

VẬT LIỆU TÁI TẠO CÙI RĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP

CLEARFIL™ DC CORE PLUS là vật liệu tái tạo cùi răng lưỡng trùng hợp (quang trùng hợp và tự trùng hợp). Đặc tính tự trùng hợp là giải pháp hoàn hảo cho những khu vực ống tủy không thể tiếp cận được với nguồn sáng. Công nghệ hạt độn đặc biệt trong CLEARFIL™ DC CORE PLUS mang lại cho vật liệu khả năng xúc biến tối ưu. Công thức không trượt đảm bảo hỗn hợp không bị chảy ngoài ý muốn. Đối với tất cả các bước, bơm vào ống tủy và tạo cùi răng, đều có thể dễ dàng sử dụng chỉ một đầu trộn với 3 phút thao tác.




ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH

- Dễ dàng sử dụng.
- Lưỡng trùng hợp.
- Thuận tiện.
- Khả năng không chảy cao.
- Thời gian thao tác 3 phút.

ĐỘ BỀN UỐN


CLEARFIL™ DC CORE PLUS cho thấy độ bền uốn cao nhất so với các vật liệu tái tạo cùi răng khác.

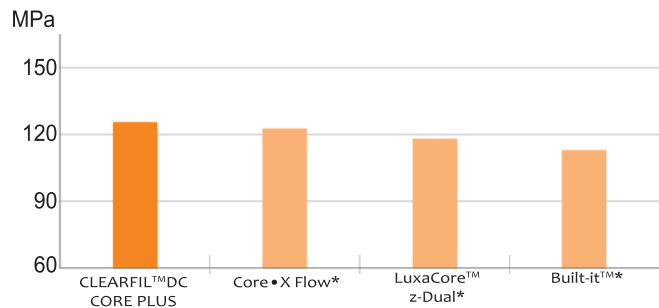

Source: Dr. C. J. Kleverlann, Academic Center for Dentistry Amsterdam, Netherlands
* Not a trademark of KURARAY CO., LTD

ĐẶC TÍNH CÂN BẰNG


Để tránh lực nhai cao ảnh hưởng đến chân răng, CLEARFIL™ DC CORE PLUS có mô đun đàn hồi gần giống với mô đun đàn hồi của ngà răng. Vì vậy, lực nhai được phân tán trên toàn bộ bề mặt của ống tủy. Hơn nữa, bất chấp lực nhai, CLEARFIL™ DC CORE PLUS luôn đảm bảo phục hồi ổn định nhờ các đặc tính cơ học tân tiến, do đó có thể đảm bảo tối thiểu nguy cơ gãy vật liệu tích tụ ở chân răng và cùi răng.

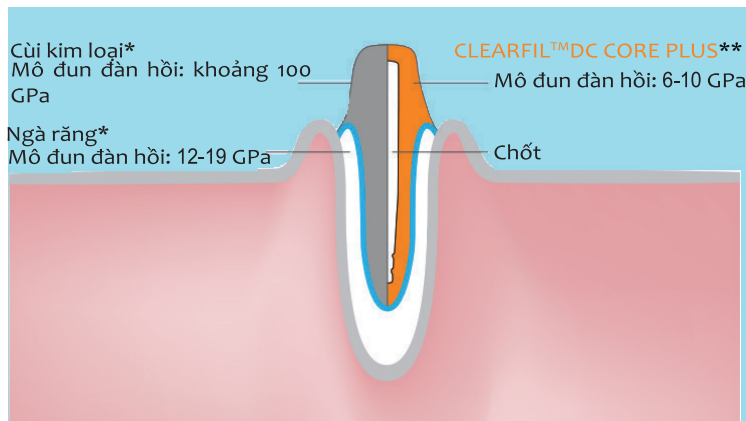

Source: S. Takahasi, T. Hirashawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.
** Source: Kuraray Medical Inc.

KIỂM SOÁT ĐỘ CHẢY

Chất độn dễ dàng được bơm ra và kiểm soát nhờ công nghệ xử lý bề mặt độ dẻo của CLEARFIL™ DC CORE PLUS.

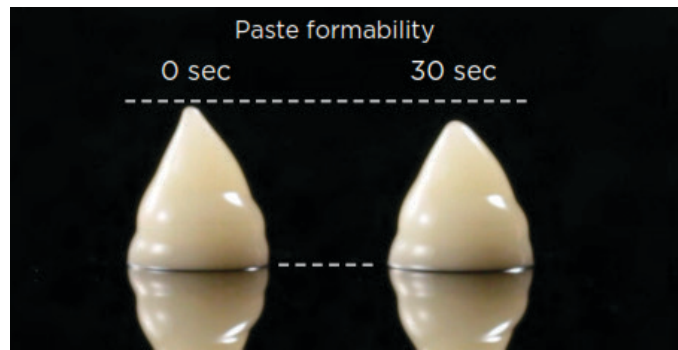


ĐỂ DÀNG SỬ DỤNG, QUY TRÌNH LÂM SÀNG THUẬN TIỆN





Bôi BOND với chuyển động cơ xát đều.



Thổi khô nhẹ và chậm cho đến khi Bond không di chuyển nữa.¹

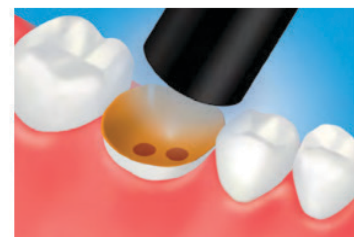

Chiếu đèn.²

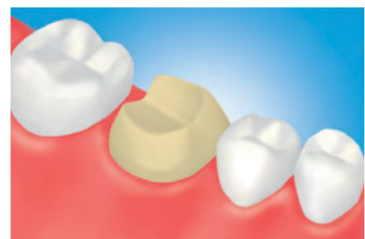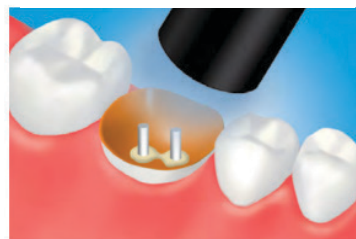

Sau gắn xi măng và tái tạo cùi răng bằng CLEARFIL™ DC CORE PLUS theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

¹ Sử dụng máy hút chân không để ngăn BOND bị phân tán

² Tham khảo bảng 1 để biết thời gian xử lý quang trùng hợp

Lưu ý: Đây là phiên bản rút gọn. Vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng

BỘ ĐÔI HOÀN HẢO CHO CÁC CA TÁI TẠO CÙI RĂNG

Do đặc tính bám dính vượt trội, CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal Quick là sự bổ sung hoàn hảo cho CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Do có chức năng tăng tốc đặc biệt để tự trùng hợp nên nó rất lý tưởng cho những khu vực mà ánh sáng không thể tiếp cận được. CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal Quick bám dính vào ngà răng trong ống tủy và chốt. Không cần dùng primer riêng.

SẢN PHẨM HIỆN HÀNH

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (Automix Syringe)

- A Paste (8.9g/4.5ml)
- B Paste (9.0g/4.5ml)

CLEARFIL™ DC CORE PLUS (có sẵn 2 màu).

- Dentin
- White