

## K-ETCHANT Syringe - GEL


GEL SOI MÒN MEN, NGÀ RĂNG

**K-ETCHANT Syringe** dạng tuýp hoàn toàn mới, cho phép toàn quyền kiểm soát quá trình thao tác. Nhờ vào đặc tính sánh đặc, etching không bị chảy ra khỏi vị trí đã được bơm ra. Đầu bơm nhỏ mới mang đến khả năng kiểm soát hoàn hảo ngay tại điểm cần xử lý.

**K-ETCHANT GEL** là một loại gel etching được sử dụng để etching men răng, ngà răng, sứ, sứ hybrid và composite để dán phục hồi. Tính năng đặc biệt của sản phẩm: khi bạn lắc chai, chất bên trong sẽ trở thành chất lỏng, giúp dễ dàng sử dụng K-ETCHANT GEL. Khi tiếp xúc với oxi, nó sẽ trở lại trạng thái gel để luôn đảm bảo rằng chỉ những vị trí cần được xử lý mới được etching.



### THAO TÁC

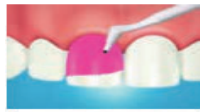

Etching men răng bằng K-ETCHANT GEL khi sử dụng kỹ thuật etching bằng axit.



Etching mào toàn sứ bằng K-ETCHANT GEL trước khi chuẩn bị lớp Silane.



Làm sạch inlay sứ bằng K-ETCHANT GEL trước khi dán xi măng.



Etching veneer bằng K-ETCHANT GEL trước khi tạo lớp Silane.



Làm sạch sứ và kim loại bằng K-ETCHANT GEL trong quá trình phục hồi trong miệng bằng veneer, trước khi tiếp xúc với chất dán (Ví dụ: REPAIR KIT).

### CHỈ ĐỊNH

- Etching men răng cắt hay chưa cắt, ngà răng.
- Dùng làm sạch sứ, sứ hybrid, composite và phục hình kim loại.
- Hoạt hóa bề mặt phục hình sứ gốc silica hoặc nhựa composite.

### LỢI ÍCH

- Đặc tính xúc biến giúp kiểm soát khi làm việc.
- Axit phosphoric 40%.
- Dễ dàng bơm tại điểm cần xử lý với đầu bơm nhỏ 0.5mm.
- Tối ưu hóa tính nhất quán trong quy trình etching.

### SẢN PHẨM HIỆN HÀNH



- 1 Chai: 6ml



**K-ETCHANT Syringe** Content: 2 K-ETCHANT Syringe (3ml), 40 needle tips

**K-ETCHANT Syringe needle tips** Content: 20 needle tips