

CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR

CHẤT HOẠT HÓA LIÊN KẾT SỨ

CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR là sản phẩm dùng để tạo lớp silane kết hợp với CLEARFIL™ BOND PLUS, lớp primer của CLEARFIL™ SE PROTECT hoặc với lớp primer của CLEARFIL™ LINER BOND 2V hoặc chất kết dính total-etch CLEARFIL™ PHOTO BOND và CLEARFIL™ NEW BOND, đảm bảo độ bền dán cao. Hỗn hợp mới có thể bôi trực tiếp lên bề mặt phục hồi bằng sứ, sứ hybrid hoặc composite để cải thiện độ bền dán, sau đó bắt đầu quy trình dán như thông thường. Quy trình dán thuận tiện, không phức tạp, tiết kiệm và không tốn thời gian.



CHỈ ĐỊNH

- Xử lý bề mặt sứ, sứ hybrid, composite sau khi trộn chất dán hoặc primer (ví dụ: CLEARFIL™ SE BOND, primer của CLEARFIL™ SE BOND...).
- Sửa chữa các phục hình trong miệng bị gãy như mão/cầu răng sứ, sứ hybrid hoặc composite.

LỢI ÍCH

- Dùng để tạo lớp silane bám dính.
- Dùng để trộn CLEARFIL™ S3 BOND, primer của CLEARFIL™ SE BOND, primer của CLEARFIL™ LINER BOND 2V, CLEARFIL™ NEW BOND, mang lại độ bền dán cao.
- Xử lý ban đầu cho các phục hồi sứ hoặc composite.
- Thích hợp dùng trong và ngoài miệng.
- Thời gian thao tác ngắn.

THAO TÁC



Kích hoạt silane: trộn primer của CLEARFIL™ SE BOND và PORCELAIN BOND ACTIVATOR theo tỉ lệ 1:1 trong đĩa trộn. Đặt silane vào vùng làm việc và để phản ứng trong 5 giây.

SẢN PHẨM HIỆN HÀNH



- **1 Chai: 4.0ml**